

救急隊のコロナ対策(消防救急隊監修品)

FSストレッチャー用エアロゾルカバーフレームセット



[ストレッチャーへのフレームの固定方法]

側面からストレッチャーとマットの間にフレーム下部を挟み込み、バックル付きのナイロンベルトでフレームが開かないように固定します。スクープストレッチャーを使用する場合は、スクープストレッチャーとマットの間に挟み込み固定してください。



フレームは簡単に折りたたんで保管できます。



正面に2カ所、側面それぞれに2カ所ずつ腕を通すことができるミシン目加工があります。



ストレッチャーをリクライニングしても使用できます。



スクープストレッチャーに使用する状況でもご利用いただけます。

New

FSストレッチャー用 エアロゾルカバーフレームセット


- サイズ:縦60cm×横48cm×奥行40cm
- 素材:フレーム/スチール・接続パーツ/樹脂クリップ/樹脂・エアロゾルカバー/ポリエチレンストラップ/ナイロン樹脂
- 付属品:エアロゾルカバー10枚付

商品番号 060-221-001 販売価格 **19,800円**

エアロゾルカバー (10枚入り)

商品番号 060-221-002 販売価格 **3,080円**

[フレームへのカバーの取付け方法]

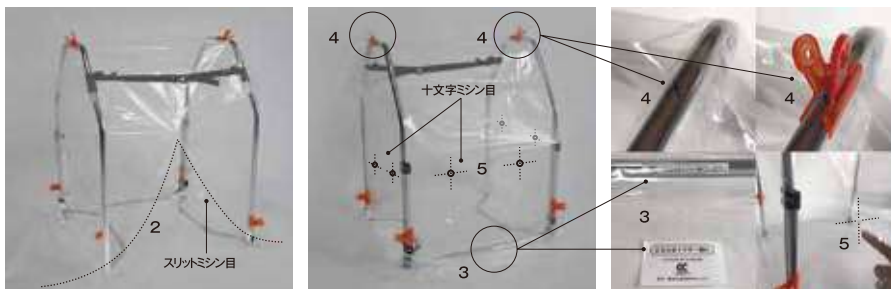

- ①エアロゾルカバーを取付けるフレームを用意します
(カバーの取付けは、適宜ストレッチャーへのフレームの固定後か固定前に行ってください。)
- ②エアロゾルカバーを広げ、スリットをミシン目に沿って裂きます。
- ③エアロゾルカバーとフレームの向きを確認しカバーを被せます。
- ④エアロゾルカバーの「X」印の部分が天面にくる位置で付属のクリップでフレームに固定します。
その他必要に応じて付属クリップでカバーを固定してください。
- ⑤救急隊員の手・腕を入れる箇所は全部で6カ所。十文字のミシン目加工が、救急隊員側に2カ所、両側面に2カ所ずつあり、中央部に○印があります。